




7-1. Włożyć baterię

7-2. Przy pierwszym użyciu lub po włożeniu nowych baterii, odczekać 10 minut na ocieplenie się termometru.

7-3. Upewnić się, czy termometr jest ustawiony na tryb pomiaru temperatury ciała (BT), a jeśli jest ustawiony na tryb mierzenia temperatury powierzchni (ST), to należy zmienić tryb na mierzenie temperatury ciała (BT), zgodnie z instrukcją ustawienia "10-2".

7-4. Skierować termometr w stronę czoła (proszę zapoznać się rysunkiem poniżej, aby dobrze go ustawić) z odległości 3-5cm, a następnie nacisnąć przycisk pomiarowy i natychmiast na ekranie wyświetla się uzyskany wynik. Czoło nie może być zakryte włosami, pokryte potem, środkami kosmetycznymi lub czapką.


7-5. Gdy temperatura w pomieszczeniu znacznie różni się od temperatury ciała lub gdy na czole występuje pot, to pomiar może być wykonany za uchem. Miejsce za uchem nie może być zakryte włosami, pokryte potem, środkami kosmetycznymi lub czapką. Zobacz rysunek.

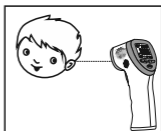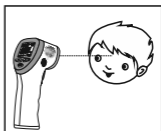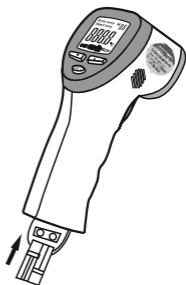

### Uwaga:

W zależności od różnych rodzajów skóry i jej grubości, temperatura może się różnić.

## 8. Pomiar temperatury powierzchni przedmiotów

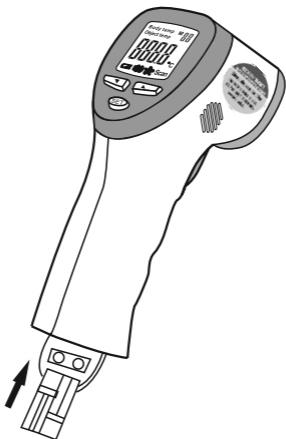

8-1. Włożyć baterię do termometru.

8-2. Przy pierwszym użyciu lub po włożeniu nowych baterii, odczekać 10 minut na ocieplenie się termometru.

8-3. Upewnić się czy termometr jest ustawiony na tryb pomiaru temperatury powierzchni (ST) i jeśli jest ustawiony na tryb mierzenia temperatury ciała (BT), to wówczas należy zmienić tryb na mierzenie temperatury powierzchni (ST), zgodnie z instrukcją ustawiania "10-2".

8-4. Skierować termometr w stronę przedmiotu z odległości 3-5cm. Następnie nacisnąć przycisk pomiarowy i temperatura zostanie natychmiast wyświetlona na ekranie. W ten sposób można na przykład zmierzyć temperaturę wody do kąpeli dziecka.