

Uwagi dotyczące przechowywania urządzenia:

1. Nie przechowywać urządzenia w miejscu, gdzie jest ono narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury lub wilgoci.
2. Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
3. Urządzenie musi być zawsze odłączone od zasilania, gdy nie jest używane.

Uwagi dotyczące czyszczenia:

1. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
2. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
3. Wyczyścić wszystkie niezbędne części po każdym użyciu w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.

4. UŻYTKOWANIE INHALATORA TŁOKOWEGO

Uwaga: Przed pierwszym uruchomieniem, urządzenie należy dokładnie oczyścić zgodnie z „procedurą czyszczenia” podaną w instrukcji użytkowania.

1. Inhalator umieść na płaskiej i stabilnej powierzchni. Upewnić się, czy mamy łatwy dostęp do elementów regulacyjnych, gdy znajdujemy się w pozycji siedzącej.
2. Delikatnie przekręcić górną część nebulizatora (pojemnik na lek) w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aby go rozmontować.
3. Napełnić dolną część lekiem przepisany przez lekarza. Sprawdzić, czy stożek znajduje się wewnątrz dolnej części.
4. Delikatnie przekręcić górną część w prawo (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegar), aby ponownie złożyć nebulizator. Należy upewnić się, czy obydwie części są dobrze połączone ze sobą.
5. Dołączyć jeden koniec przewodu powietrza do podstawy nebulizatora.
6. Podłączyć drugi koniec przewodu powietrznego do łącznika przewodu powietrza znajdującego się z przodu kompresora.
7. Podłączyć ustnik lub maskę, według własnego uznania, do górnej części nebulizatora.
8. Podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Upewnić się, czy na tym etapie, przełącznik zasilania jest w pozycji "0".
9. Nacisnąć przycisk zasilania, aby rozpocząć przepisany zabieg.



Umieścić stożek wewnątrz i napełnić lekiem dolną część

Ważne:

Kompresor jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne, które wyłączy urządzenie zanim nadmiernie się ono nagrzeje. Gdy zabezpieczenie termiczne wyłączy urządzenie, należy:

- a. Wyłączyć urządzenie.
 - b. Odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
 - c. Odczekać 30 minut, aż silnik ostygnie zanim zostanie ponownie uruchomiony.
- Upewnić się, czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte.

10. Po zakończeniu zabiegu, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.



Ostrzeżenie: Urządzenie służy wyłącznie do podawania leków przeznaczonych do nebulizacji. Stosowanie olejków eterycznych, stężonych roztworów soli czy oleistych preparatów przeznaczonych do inhalacji na gorąco powoduje uszkodzenie urządzenia i zdjęcie gwarancji producenta.