

## 6 Pierwsze użycie


Przed użyciem inhalatora po raz pierwszy

Uwaga: Przed użyciem, urządzenie i akcesoria powinny być dokładnie wyczyszczone i odkażone. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt. 8.

### 6.1 Połączenie głowicy rozpylającej z główną częścią inhalatora:


Wyjąć urządzenie z opakowania.

Jeśli jego elementy nie są połączone, proszę przyłączyć głowicę rozpylającą z siatką z pojemnikiem na lekarstwo do głównej części inhalatora. Połączenie będzie właściwie zrobione, jeśli usłyszymy dźwięk "kliknięcia". Proszę zob. Rys 1.

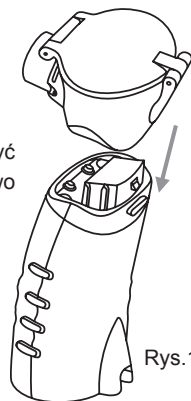

Rys.1

Uwaga: Aby odłączyć głowicę rozpylającą z pojemnikiem na lekarstwo od głównej części inhalatora, nacisnąć przycisk "PRESS" (Zob. Rys.2) i jednocześnie pociągnąć głowicę do góry.

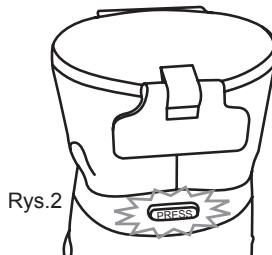

Rys.2


### 6.2 Wkładanie baterii

- Otworzyć przedział na baterie (6) znajdujące się od spodu urządzenia.
- Włożyć dwie alkaliczne baterie (typ AA LR6). Proszę upewnić się, czy baterie są włożone zgodnie z biegunami. (Rys.3)
- Zamknąć przedział na baterie.



### Uwaga:

- Podczas wymiany baterii, należy upewnić się, czy pojemnik na lekarstwo jest całkowicie pusty, ponieważ w przeciwnym wypadku grozi to wylaniem się płynu.
- Gdy pomarańczowa dioda LED (5) zaświeci się, należy wymienić obie baterie na nowe, ponieważ rozpylanie staje się mniej wydajne, gdy baterie są słabe.
- Z nowymi bateriami alkalicznymi urządzenie może pracować przez około 100 minut. Wystarcza to na 5~8 aplikacji soli fizjologicznej.

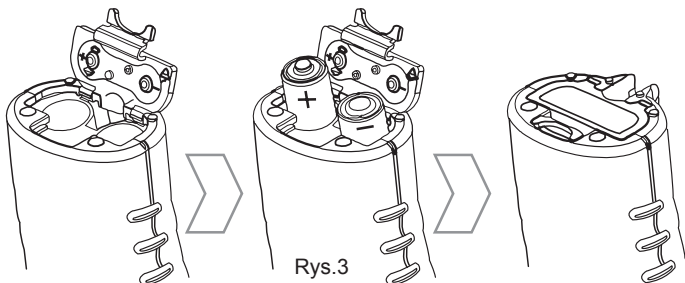

### 6.3 Praca urządzenia z zasilaczem sieciowym (opcja)

- Podłączyć zasilacz sieciowy AC (13) tylko do napięcia sieciowego, którego wartość podana jest na tabliczce znamionowej.
- Włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego AC do gniazda (7) w urządzeniu, a zasilacz sieciowy AC (13) do odpowiedniego gniazdzka elektrycznego.
- Podczas korzystania z zasilacza AC, proszę wyjąć baterie z przedziału na baterie.



### UWAGA:

- Proszę upewnić się, czy w pobliżu miejsca, w którym korzystamy z urządzenia znajduje się gniazdo sieciowe.
- Ułożyć kabel sieciowy tak, aby nikt się na nim nie przewrócił.
- Aby odłączyć inhalator z sieci zasilającej, należy najpierw wyłączyć urządzenie, a następnie wyjąć zasilacz sieciowy AC z gniazdzka.
- Zasilacz sieciowy AC nie może być używany do ładowania baterii.


## 7 Obsługa

### 7.1 Napełnianie pojemnika lekiem:


- Otworzyć pojemnik podnosząc zatrzask (Zob. rys. 4, 5)
- Napełnić pojemnik lekiem. (Zob. rys. 6)
- Zamknąć pojemnik naciskając mocno i dokładnie zatrzask. (Zob. rys. 7)




Rys. 4

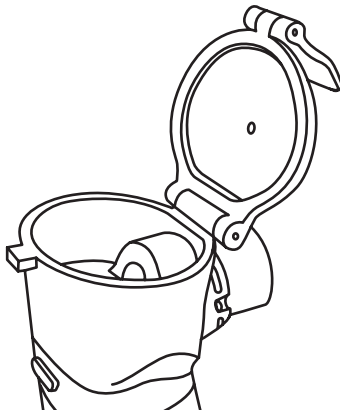

Rys. 5

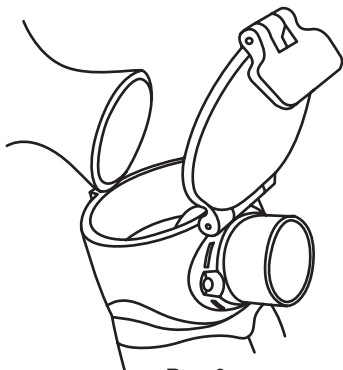

Rys. 6

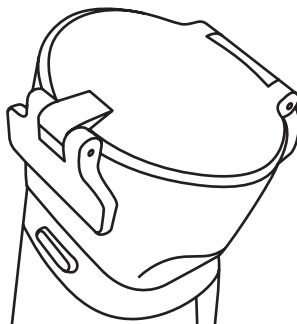


Rys. 7

## 7.2 Inhalacja przy pomocy ustnika

a. Podłączyć ustnik do otworu wyjściowego siatki. (Zob. rys. 8)

Uwaga: Proszę upewnić się, czy ustnik jest połączony prawidłowo. Napis **"DOWN"** na ustniku powinno znajdować się od spodu, gdy ustnik jest połączony prawidłowo.

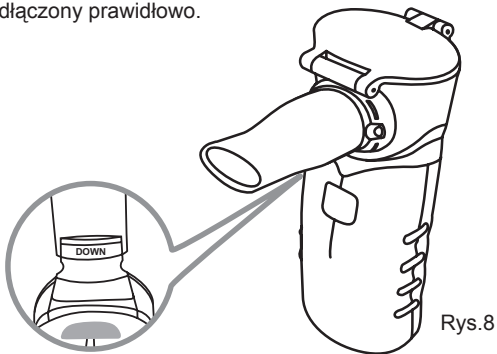

Rys.8

b. Usiąść prosto i przytrzymać inhalator jak najbardziej pionowo, nie przechylając go o więcej niż 45 stopni w którymkolwiek kierunku.

c. Dokładnie objąć wargami ustnik.

d. Nacisnąć przycisk On/ Off. Na przycisku On/ Off zaświeci się niebieska dioda LED.

Uwaga: W każdym momencie podczas dozowania lektarstwa można wyłączyć inhalator naciskając przycisk On/ Off.

e. Wdychać powietrze powoli i głęboko ustami, a wydychać przez nos.

f. Gdy lektarstwo całkowicie zostanie przekształcone w formę lotną, to urządzenie automatycznie się wyłączy.



Uwaga: Resztko lektarstwa może pozostać w ustniku z powodu gromadzenia się pary wodnej.

g. Natychmiast po każdym użyciu należy zdezynfekować i wyczyścić inhalator.

Uwaga: Aby przedłużyć żywotność siatki, należy odczekać co najmniej 1 godzinę przed następnym użyciem inhalatora.

### 7.3 Inhalacja z użyciem maski

- a. Przyłączyć element łączący maskę do otworu wyjściowego siatki, a następnie połączyć maskę do elementu łączącego. (Zob. rys. 9, 10)
  - b. Usiąść prosto i przytrzymać inhalator jak najbardziej pionowo, nie przechylając go o więcej niż 45 stopni w którymkolwiek kierunku.
  - c. Nacisnąć przycisk On/ Off. Na przycisku On/ Off zaświeci się niebieska dioda LED.  
Uwaga: W każdym momencie podczas dozowania lektarstwa można wyłączyć inhalator naciskając przycisk On/ Off.
  - d. Wdychać powietrze powoli i głęboko ustami, a wydychać przez nos.
  - e. Gdy lektarstwo całkowicie zostanie całkowicie rozpylone, to wówczas urządzenie automatycznie się wyłączy.  
Uwaga: Resztkę lektarstwa może pozostać w masce z powodu gromadzenia się pary wodnej.
- f. Natychmiast po każdym użyciu należy zdezynfekować i wyczyścić inhalator.  
Uwaga: Aby przedłużyć żywotność siatki, należy odczekać co najmniej 1 godzinę przed następnym użyciem inhalatora.

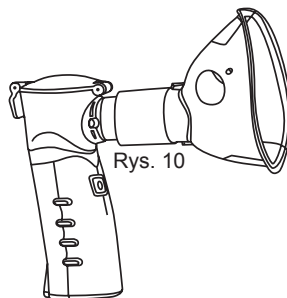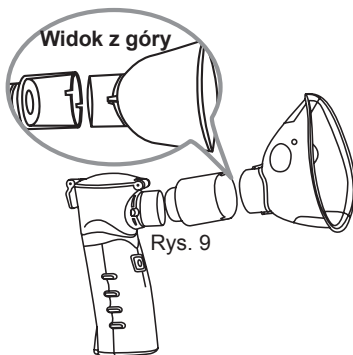

#### Uwaga:

Element łączący maskę powinien być dołączony do modułu siatki w takim samym kierunku, jak jest to pokazane na rysunku.

Maska powinna zostać podłączona do elementu łączącego w kierunku pokazanym na rysunku.