

3. Nieużywane urządzenie zawsze powinno być odłączone od źródła zasilania.


UWAGI NA TEMAT CZYSZCZENIA

1. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Może to spowodować uszkodzenie inhalatora.
2. Urządzenie przed czyszczeniem należy odłączyć od sieci elektrycznej.
3. Po każdorazowym użyciu należy wyczyścić wszelkie niezbędne elementy urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją.

4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INHALATORA


Uwaga: Przed pierwszym użyciem inhalator powinien być dokładnie wyczyszczony, zgodnie z Procedurami czyszczenia z niniejszej instrukcji.

1. Ustawić inhalator na płaskiej i stabilnej powierzchni. (Należy się upewnić, że wszelkie przyciski sterowania będą w zasięgu ręki w trakcie inhalacji.)
2. W celu rozmontowania nebulizatora należy delikatnie przekręcić górną część nebulizatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wypełnić dolną część nebulizatora lekiem przepisany przez lekarza. (Należy się upewnić, że niebieski stożek jest umieszczony wewnątrz w dolnej części nebulizatora.).

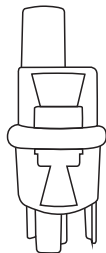

Proszę umieścić śmigielko wewnątrz dolnej części.

4. Delikatnie nałożyć i przekręcić górną część zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć nebulizator.
(Należy się upewnić, że żółta wkładka dystansująca znajduje się wewnątrz nebulizatora i jest osadzona na niebieskim stożku.)
5. Przymocować końcówkę przewodu powietrznego do podstawy nebulizatora.
6. Drugą część przewodu powietrznego podłączyć do konektora umieszczonego w przedniej części urządzenia.
7. Przymocować odpowiednią końcówkę do inhalacji (ustnik, maskę itp. w zależności od potrzeby) do górnej części nebulizatora.
8. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do właściwego gniazdka elektrycznego. (Na tym etapie należy się upewnić, że włącznik urządzenia jest w pozycji OFF=wyłączony.)
9. Aby rozpocząć inhalację, należy przełączyć włącznik w pozycję ON=włączony.
10. Po zakończeniu leczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej.

 **WAŻNE:** Silnik urządzenia posiada zabezpieczenie termiczne, które wyłącza urządzenie zanim dojdzie do jego przegrzania. W przypadku, gdy zabezpieczenie termiczne uruchomi się, należy:

- a) ustawić włącznik w pozycji „OFF”,
- b) odłączyć inhalator od sieci elektrycznej,
- c) odczekać 30 minut, aby silnik schłodził się przed następnym użyciem.

(Należy się upewnić, że wloty powietrza nie są zablokowane.)

5. PROCEDURY CZYSZCZENIA

Zaleca się, aby nebulizator i każda końcówka użyta do inhalacji (np. ustnik, maska) były dokładnie myte przy pomocy gorącej wody po każdorazowym użyciu oraz myte przy użyciu łagodnego detergentu po ostatnim użyciu danego dnia. Jeśli lekarz lub terapeuta zaleci inną procedurę czyszczenia, należy zastosować się do niej.