



BEZRĘCIOWY TERMOMETR INTEC GA-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termometr INTEC GA-01 nie zawiera rtęci. Został wypełniony innowacyjnym stopem galu, indu i cyny – galinstanem, który jest nietoksyczny, a posiada właściwości pomiarowe rtęci.

Dzięki szklanej obudowie jest łatwy w czyszczeniu i tym samym higieniczny, a także antyalergiczny, ponieważ nie zawiera PCV, niklu itp.

Termometr jest w pełni ekologiczny – nie zawiera rtęci, baterii, elektroniki. Obudowa jest szklana.

Przed użyciem należy upewnić się czy słupek cieczy w kapilarze znajduje się poniżej poziomu 36°C na skali. Jeśli nie, należy go strząsnąć, aż znajdzie się poniżej tego poziomu.

Termometrem bezręciowym INTEC GA-01 można zmierzyć temperaturę ciała na 3 sposoby:

Pomiar pod pachą – czas pomiaru: min. 4 minuty

Skórę pod pachą należy osuszyć przed pomiarem. Umieść termometr w dole pachowym i dociśnij ramię do tułowia, aby zamknąć szczelnie dół pachowy. Nie dociskaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić termometru.

Pomiar w ustach (metoda oralna) – czas pomiaru: min. 2 minuty

Termometr włóż do ust i umieść jego końcówkę pod językiem po lewej lub prawej stronie. Zamknij usta na czas pomiaru, aby zapewnić szczelność. Nie gryź termometru.

Pomiar w odbycie (metoda rektalna) – czas pomiaru: min. 1 minuta

Końcówkę termometru przed pomiarem można posmarować np. olejkami dla niemowląt w celu łatwiejszej aplikacji i wsunąć ją do odbytu (na głębokość ok. 2 cm). Uwaga!, aby nie złamać termometru.

Po dokonaniu pomiaru wynik można odczytać na skali termometru.

Po pomiarze i przed umieszczeniem termometru w etui należy go dokładnie umyć.

STRZAŚNIANIE

Zaleca się strząśnięcie cieczy w kapilarze natychmiast po pomiarze, gdyż jest to wtedy najłatwiejsze.

1. W celu strząśnięcia płynu należy złapać górną część termometru palcem wskazującym i kciukiem i kilkakrotnie energicznie strząsnąć słupek cieczy poniżej poziomu 36°C.

2. Do strząśnięcia płynu można również użyć załączonego etui. Umieść termometr w plastikowym etui. Zakręć górną pokrywę pojemnika. Złap elastyczną końcówkę etui kciukiem i palcem wskazującym i kilkoma energicznymi ruchami strząśnij słupek cieczy poniżej poziomu 36°C.

UWAGA:

- Na 30 minut przed dokonaniem pomiaru nie należy brać kąpieli, palić papierosów ani jeść.
- Nie zaleca się dokonywania pomiaru metodą oralną u dzieci poniżej 10 roku życia.
- Podczas pomiaru w ustach należy zachować spokój, nie rozmawiać, nie gryźć termometru i nie ruszać się.
- Podczas pomiaru metodą rektalną u dzieci należy wsunąć termometr do odbytu na głębokość ok. 2 cm i trzymać go w tej pozycji tak, aby termometr nie wysunął się ani nie wsunął zbyt głęboko. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby termometr nie złamał się podczas pomiaru.
- Termometru nie wolno zanurzać ani myć w wodzie o temperaturze wyższej niż jego maksymalny zakres pomiarowy.
- Termometr należy przechowywać z dala od źródeł ciepła lub miejsc narażonych na działanie promieni słonecznych.
- Termometr nie jest zabawką. Należy go przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Warunki działania:

- Zakres pomiaru wynosi 32°C – 42°C. W celu uzyskania wiarygodnych wyników temperatura otoczenia powinna znajdować się w zakresie 20°C – 30°C.
- Dokładność wynosi 0,1°C.
- Produkt jest zgodny z normą EN12470-1:2000 - Termometry lekarskie, część 1. Termometry szklane wypełnione cieczą metaliczną, wskazujące maksimum.
- Termometr został wyprodukowany zgodnie z wymogami Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych i otrzymał znak CE 1023.

Wytwórca:

Wuxi Medical Instrument Factory, No.86 East Street,
Zhangjing, Xibei Town, Wuxi City, Jiangsu, 214194 China

EC REP Podmiot odpowiedzialny w UE:

Lotus Global Co., Ltd. 1 Four Seasons Terrace, West Drayton, Middlesex,
London, UB7 9GG, United Kingdom

Importer:

Intec Medical Sp. z o.o., ul. L. Podbięty 7,
31-980 Kraków, www.intecmedical.pl

Data ostatniej aktualizacji Instrukcji Obsługi 15.06.2015 r.



WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy i swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancji nie podlega opakowanie, uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnej naprawy, wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
3. Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, że Sprzęt jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie w momencie zakupu.
5. Zgłoszenia reklamacji Sprzętu z tytułu udzielonej na niego gwarancji można dokonać za pośrednictwem sklepu, w którym dokonano zakupu, bądź też bezpośrednio u Gwaranta (dane kontaktowe znajdują się poniżej).
6. Reklamowany Sprzęt należy dostarczyć do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub też bezpośrednio do Gwaranta. Urządzenie powinno znajdować się w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
7. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego Sprzętu do serwisu Gwaranta.
8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wyłącznie Gwarant.
9. W sprawach nierozstrzygniętych niniejszą Kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Data sprzedaży, podpis i pieczęć Sprzedawcy:

Adres Serwisu:
Serwis Intec Medical Sp. z o.o.
ul. L. Podbięty 7, 31-980 Kraków
E-mail: serwis@intecmedical.pl
tel: 12 376 81 15